

Prozess:	Instrumentenkreislauf	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <small>Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie</small>
Dokumententitel:	SOP Instrumentenaufbereitung	
gültig ab:	24.11.2014	

SOP INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

<p>Gültigkeitsbereich: Gesamte urologische Abteilung.</p> <p>Zweck: Sicherstellung des richtigen und raschen Versandes und der korrekten Rücknahme von Sterilgut an und von der Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg (MPAV). Sicherstellung des ausreichenden Vorhandenseins von sterilem und funktionstüchtigem Instrumentarium.</p>

Anweisung:

1. **Am PC (nur am PCFUROA04C möglich):**
 - Programm Instacount Plus mit Kürzel: „uro“ und Kennwort: „flow“ öffnen
 - „Objekte buchen“ anklicken und LKHF Warenausgang Ambulanz Ost anwählen

2. **Am unsterilen Arbeitsplatz:**
 - Nach Gebrauch der Instrumente werden die dazugehörigen Plaketten zeitnah eingescannt.
 - Ist für das betreffende Instrument keine Plakette vorhanden werden die Instrumente auf der dafür vorgesehenen Liste mittels Strich erfasst.

3. **Am PC:**
 - Im Programm Instacount Plus unter Bestände: Tracking+History anwählen und
 - Bei Navigation „über Checkpunkt“ und bei Filter die „F URO Amb“ auswählen.
 - Unter Trackingdatum das gewünschte Datum eingegeben
 - Anschließend über rechte Maustaste: Tabelle drucken
 - Diese Liste sowie die Strichliste (Instrumente ohne Plakette) werden kopiert.
 - Das Original wird mit den Instrumenten mitgeschickt, die Kopie wird bei uns in der gelben Mappe abgelegt.

- **Sterilgutkontrolle bei Rückgabe aus MPAV:**
 - Kontrolle anhand beiliegender Instrumentenliste auf Vollständigkeit
 - Sichtkontrolle der sterilen Verpackung auf Beschädigungen
 - Komplettierung des Instrumentenvorrates im OP, sowie Röntgen-Raum

- **Besonderheiten:**
 - **Flexibles Cystoskop und flexibles Olympus- URS- Gerät** gehen zum Waschen in die Endoskopie, erst anschließend mit Desinfektionsnachweis in Transportbox, Scannen und zur MPAV

Mitgeltende Dokumente:
Historie:
V02 vom 24.11.2014: Ablauf aktualisiert

Verfasser: Abt.Ltg. DGKP Jankowsky	24.11.2014	ID: SOP103.F.1001017.02	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	24.11.2014	Datei: .pdf	
Freigegeben: Abt. Ltg. DGKP Jankowsky	24.11.2014	Version: 02	Seite 1 von 2

Prozess:	Instrumentenkreislauf	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <i>Universitäres Lehrkrankenhaus</i> Urologie
Dokumententitel:	SOP Instrumentenaufbereitung	
gültig ab:	24.11.2014	

Verfasser: Abt.Ltg. DGKP Jankowsky	24.11.2014	ID: SOP103.F.1001017.02	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	24.11.2014	Datei: .pdf	
Freigegeben: Abt. Ltg. DGKP Jankowsky	24.11.2014	Version: 02	Seite 2 von 2